


Система контроля уровня глюкозы в крови (глюкометр) портативная ВанТач Верлио Рефлект (OneTouch Verio Reflect®)

Краткое руководство пользователя

В этом руководстве приведены краткие сведения о глюкометре и описан порядок действий для начала работы.

ВАЖНО! Прочитайте руководство пользователя из комплекта поставки системы.

Значки, отображаемые глюкометром

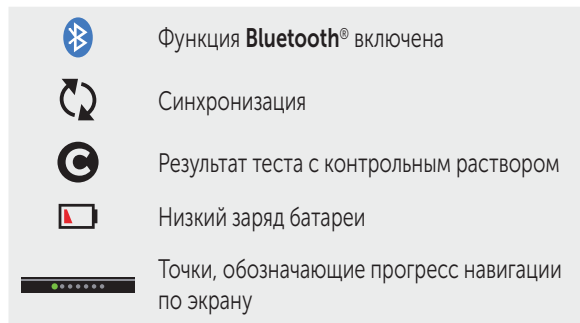

Символы и значки, отображаемые глюкометром, а также их значения см. в руководстве пользователя.

Уполномоченный представитель в России: ООО «ЛайфСкан Раша»
Российская Федерация, 121614
г. Москва, ул. Крылатская
д. 17, корп. 4, эт. 2, пом. I, ком. 2

Горячая линия OneTouch®: 8-800-200-83-53
(звонок по России бесплатный).
Время работы: круглосуточно с 9:00
понедельника до 21:00 пятницы.

Производитель:
«ЛайфСкан Юроп ГмбХ»
Губельштрассе 34
6300 Цуг, Швейцария
LifeScan Europe GmbH
Gubelstrasse 34
6300 Zug, Switzerland

OneTouch®
AW 072190018
© 2018–2021 LifeScan IP Holdings, LLC
Дата редакции макета: 02/2021

Ознакомьтесь с инструкцией по применению.



1 Настройка глюкометра


Включите глюкометр

Нажмите и удерживайте кнопку (OK) до появления экрана приветствия.

С помощью кнопки (↑) или (↓) задайте требуемые значения каждого параметра и нажмите (OK) для подтверждения.


Установите язык

Выделите необходимый язык и нажмите (OK).

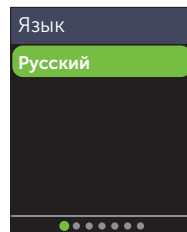

Опционально: завершите настройку с помощью мобильного приложения OneTouch Reveal®*

Нажмите **Да**, чтобы приложение провело вас через настройку.

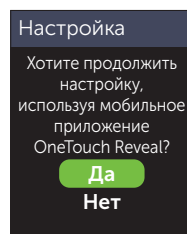


Загрузите мобильное приложение OneTouch Reveal® до синхронизации глюкометра и мобильного устройства.



Установите время


Если время задано верно, нажмите (OK), в противном случае внесите изменения и подтвердите их.

* На веб-сайте www.OneTouch.ru можно узнать, доступно ли мобильное приложение OneTouch Reveal® в вашей стране, и ознакомиться с подробной информацией о нем.

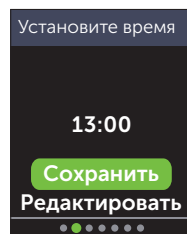


Установите дату

Если дата задана верно, нажмите (OK), в противном случае внесите изменения и подтвердите их.

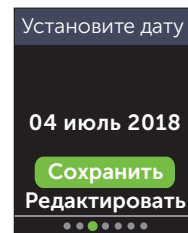


Установите границы диапазонов «До еды» и «После еды»

Если предварительные настройки границ диапазонов «До еды» и «После еды» указаны верно, нажмите (OK), в противном случае внесите изменения и подтвердите их.

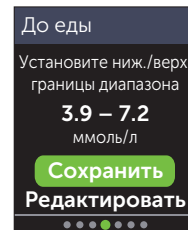


Настройте трекер тестов

Если предварительно установленный план верный, нажмите (OK), в противном случае внесите изменения и подтвердите их.

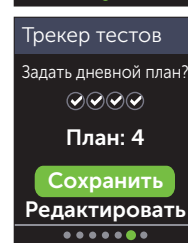

Установите среднее значение целевого уровня глюкозы за 90 дней

Если среднее значение целевого уровня глюкозы за 90 дней установлено верно, нажмите (OK), в противном случае внесите изменения и подтвердите их.

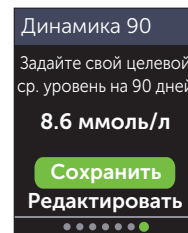

ПРИМЕЧАНИЕ. Обсудите с врачом подходящие для вас значения границ диапазона, частоту самоконтроля уровня глюкозы в крови (план по количеству измерений в день) и среднее значение целевого уровня глюкозы в крови за 90 дней.

2 Проведение измерения

Перед получением образца крови вымойте руки теплой водой с мылом, ополосните и вытрите их насухо. Снимите колпачок ручки для прокалывания и вставьте стерильный ланцет. Снимите защитную крышку. Установите колпачок обратно.



Вставьте тест-полоску (золотистой стороной и 2-мя серебристыми зубцами к себе), чтобы включить глюкометр.



Зона для ввода тест-полоски

Отрегулируйте глубину прокола на ручке для прокалывания. Введите ручку для прокалывания и плотно прижмите к кончику пальца сбоку. Нажмите кнопку спуска. Слегка сожмите палец, пока не появится круглая капля крови.



Нанесите образец крови, прикоснувшись к нему любой из двух сторон капилляра тест-полоски.

Когда капилляр наполнится, он станет красным, результат отобразится через 5 секунд.


3

Просмотр результатов

Динамический индикатор диапазона ColourSure®

Динамический индикатор диапазона ColourSure® позволяет мгновенно узнать, находится ли ваш результат ниже (голубой), выше (красный) или в пределах (зеленый) диапазона. Он также оповестит о приближении вашего уровня глюкозы к нижней или верхней границе целевого диапазона. Текстовое сообщение или смайлик указывают на сегмент цветовой шкалы.


Примеры результатов

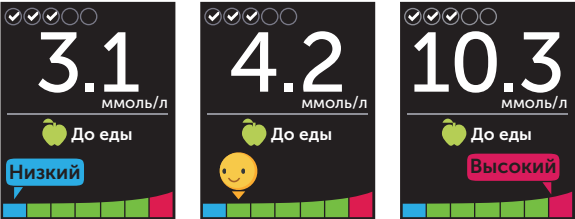

Ниже диапазона Нижняя граница диапазона Выше диапазона

Добавление отметок о еде и других событиях

Отметка «До еды» (🍏) будет автоматически добавлена к результату. Вы можете изменить эту отметку на отметку «После еды» (🍌) и добавить отметку о событии.

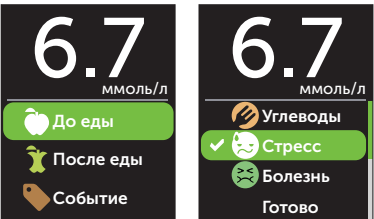

Сообщения функции Помощника Blood Sugar Mentor

Функция Помощник Blood Sugar Mentor сообщает, как у вас дела, и дает советы по управлению диабетом, к числу которых относятся информационные и мотивирующие сообщения, основанные на текущем и предыдущих результатах измерения уровня глюкозы и других отслеживаемых данных.

Примеры сообщений функции Помощника Blood Sugar Mentor



Анализ Советы Мотивация

Blood Sugar - глюкоза крови, Mentor - помощник.

Наименование и логотип Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими корпорации Bluetooth SIG, Inc., и используются компанией LifeScan Scotland Ltd. по лицензии. Другие товарные знаки и торговые наименования являются собственностью соответствующих владельцев.

4


Подключение к мобильному устройству

Технология Bluetooth® позволяет отправлять по беспроводной связи результаты измерений на мобильное устройство, на котором с помощью мобильного приложения OneTouch Reveal® можно просматривать результаты и строить графики, устанавливая дневные планы по тестам, просматривать сообщения функции Помощника Blood Sugar Mentor и выявлять тренды.

В разделе Настройки выделите раздел Bluetooth и нажмите (ОК).

Значок ✓ указывает, включена или выключена функция Bluetooth® в данный момент. Нажмите (↶) или (↷), чтобы изменить состояние функции Bluetooth® на «включено» и нажмите (ОК).

При отображении запроса на мобильном устройстве введите указанный PIN-код.

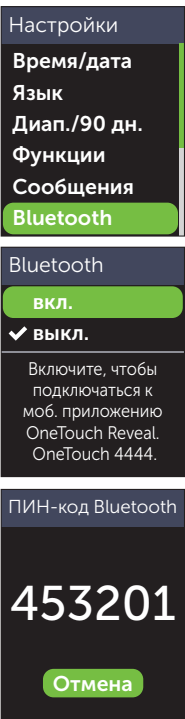

Пример PIN-кода

ONETOUCH Verio Reflect®

Система контроля уровня глюкозы в крови (глюкометр) портативная УанТач Верлио Рефлект (OneTouch Verio Reflect®)

Краткое руководство пользователя



AW 07219001B